

Standaard worden er twee maten oordopjes geleverd. Probeer eerst de grootste (8-12mm) oordopjes volgens onderstaande instructies, in het oorkanaal te plaatsten. Indien het grote oordopje moeilijk in te brengen is of oncomfortabel aanvoelt, dan kunt u het kleinere (6-11mm) oordopje proberen. Om de gecertificeerde demping te bereiken is het belangrijk dat er een goede afsluiting is tussen het oordopje en het oorkanaal.

Inbrengen oordopjes: Om het risico op infecties te verminderen is het belangrijk dat zowel de handen als de oordopjes schoon zijn voordat u deze inbrengt. Pak het lipje van het oordopje tussen duim en wijsvinger (Afbeelding A). Om het inbrengen te vergemakkelijken trekt u met uw andere hand de bovenkant van uw oor naar buiten en omhoog (Afbeelding B). Duw en draai het oordopje voorzichtig in het oor totdat deze comfortabel in het oor zit en een goede afsluiting vormt met het oorkanaal. Positioneer het lipje aan de bovenkant van het oor, zodat het lipje makkelijker is te vinden en vast te pakken bij het verwijderen van het oordopje.

Verwijderen uit het oor: Voor u de oordopjes uit het oor haalt is het aan te raden eerst met een voorzichtige draaiende beweging de afsluiting met het oorkanaal te verbreken. Dit helpt een onaangename druk op het trommelvlies te voorkomen. Berg de gehoorbescherming, na reiniging, op in een schoon bewaarsysteem.

Reinigen gehoorbescherming: Reinig het oordopje na ieder gebruik om oorsmeer (cerumen) en eventueel andere vuil te verwijderen. De oordopjes kunnen schoongeveegd worden met een vochtige doekje of antibacteriële reinigingsdoekjes. Spoel het oordopje hierna af met lauwwarm water en maak het grondig droog.



Opbergen: Bewaar de gehoorbescherming altijd in een schoon bewaarsysteem. Bewaar geen andere voorwerpen bij de gehoorbescherming.

Waarschuwingen:

- Om gehoorbeschadiging te voorkomen dient in luidruchtige situaties altijd geschikte gehoorbescherming gedragen te worden.
- De gehoorbescherming dient te worden ingebracht en onderhouden overeenkomstig met de instructies. Regelmatig reinigen van het product en voldoende aandacht schenken aan onderhoud zorgen voor langdurige en optimale prestaties.
- Om het gespecificeerde dempingsniveau te bereiken dient het oorkanaal volledig afgesloten te worden door het oordopje.
- De onderdelen van de gehoorbescherming kunnen beschadigd raken als ze in contact komen met een scherp voorwerp.
- Controleer de dopjes regelmatig op scheurtjes of andere beschadigingen. Deze zullen een negatief effect hebben op de demping. Vervang indien nodig.
- De gehoorbescherming kan aangetast worden wanneer deze in contact komt met chemicaliën of alcohol.
- Houd de gehoorbescherming buiten het bereik van kleine kinderen.

Garantie: Dit product wordt gedekt door een twee (2) jaar beperkte fabrieksgarantie.

HANDLEIDING

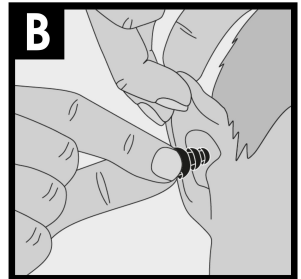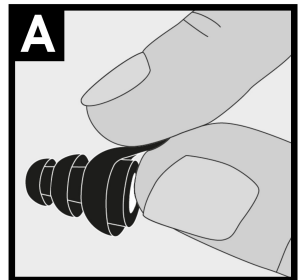

CE

EN 352-2:2002